

to go



smile

## COMPONEER®

Direct Composite Veneers

Die innovative und verblüffend einfache  
Frontzahnrestauration

# COMPONEER®

## Das neue direkte Composite Veneering System.

### Für die innovative und verblüffend einfache Frontzahnrestauration

COMPONEER sind polymerisierte, vorgefertigte Nano-Hybrid-Komposit Schmelz-Schalen, die die Vorteile der direkten Kompositrestauration mit den Vorteilen von vorgefertigten Veneers verbinden. Sie bieten erstmals ein durchdachtes System, das durch die konfektionierten Komposit Schalen verblüffend einfache Frontzahnrestaurationen ermöglicht.





Mit den vorgeformten, in verschiedenen Grössen erhältlichen COMPONEER Komposit Schalen, sind sowohl Einzel- als auch Komplettrekonstruktionen im Frontzahnbereich einfach und effizient durchzuführen. Mühevoll gestaltet der anatomischen Form und Oberfläche sowie aufwändiges Ausarbeiten entfallen. Das COMPONEER kann jederzeit mit Komposit der individuellen Situation angepasst werden.

## Das Lächeln zum einfach Mitnehmen


Dank COMPONEER können hochwertige ästhetische Frontzahnrestorationen in bereits einer Sitzung effizient realisiert werden. Bisher konnte der Behandler nur zwischen der direkt modellierten Kompositrestauration und der aufwändigen, indirekten Veneertechnik wählen. Mit dem direkten Komposit Veneer System wird die bisherige Behandlungspalette um eine interessante Option erweitert und eröffnet neue wirtschaftliche Perspektiven für Zahnarzt und Patient. Patienten erhalten ein natürliches ästhetisches Lächeln in einer Sitzung, das Lächeln zum einfach Mitnehmen – ein „Smile to go“.

### Die Vorteile für den Zahnarzt:

- Einfach und effizient in der Anwendung
- Nur eine Sitzung erforderlich
- Wertige Zahnrestauration mit ausgezeichnetem ästhetischen Resultat
- Keine Abformung und kein Labor notwendig
- Beste Individualisierungsmöglichkeiten (Farbwahl, Akzentuierung von Form und Struktur)
- Wirtschaftlich für Zahnarzt und Patient durch hohe Gelingsicherheit und Effizienz
- Hohe Wertschöpfung: Die Lösung für viele Patienten, bei überschaubarem Aufwand für den Behandler

### Gute Gründe für den Patienten:

- Schöne Zähne nach nur einem Besuch
- Zahnhartsubstanz schonend
- Weniger Belastung durch die Behandlung
- Individualisierbare Lösung
- Hohe Oberflächen- und Randqualität
- Wirtschaftlicher gegenüber indirekten Lösungen

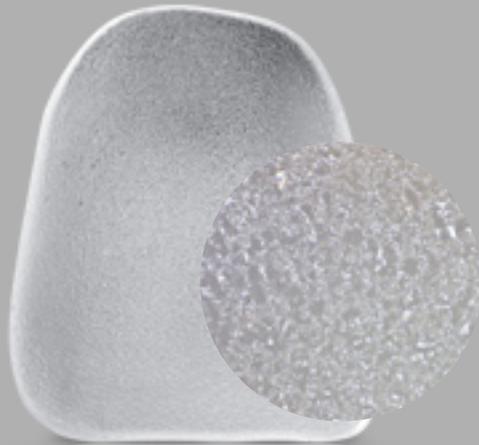

Neuartige Innenoberfläche mit mikroretentiver Struktur für einen nachhaltigen Verbund (24 MPa, siehe Studie "One Coat Bond" Seite 7).

### COMPONEER - Technische Angaben:

Biegemodul	9000 MPa
Biegefestigkeit	127 MPa
Wasseraufnahme	16 µg/mm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit	0,9 µg/mm <sup>3</sup>
Röntgenopazität	2 mm Al
Vickershärte	73 kg/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	392 MPa
Kleinste Partikelgrösse	20 nm
∅ Partikelgrösse Füllstoff	0,6 µm
Füllstoffgehalt nach Gewicht	80 %
Füllstoffgehalt nach Volumen	65 %
Dichte	2,0 g/cm <sup>3</sup>

(Quelle: Interne Messungen)



Ab 0,3 mm Veneerstärke.  
Das ermöglicht eine minimal invasive Präparation.

COMPONEER  
Bleach Opaque (BL/O)



Zum Aufhellen und  
Maskieren

COMPONEER  
White Opalescent (WO)



Für helle und  
gebleichte Zähne

COMPONEER  
Universal



Für eine natürliche  
Restauration

# So durchdacht, dass selbst unsere Entwickler lächeln. Vor Stolz.

Ein einfaches Produkt. Eine tolle Lösung. Ein durchdachtes System. COMPONEER, Direct Composite Veneers, sind eine ganz neue Kategorie von Veneers. Sie werden aus einem hochgefüllten Nano-Hybrid-Komposit industriell hergestellt, was eine ausgezeichnete Homogenität und Stabilität der Schmelzschalen gewährleistet. Die äusserst dünnen Veneerstärken ab 0,3 mm ermöglichen eine sehr zahnschonende Präparation. Durch die glänzende und natürlich gestaltete Oberfläche erhält die Restauration ihren vitalen Charakter.

Die neuartige mikroretentive Innenoberfläche erhöht die Benetzbarkeit und stärkt den nachhaltigen Verbund. Ein spezielles Konditionieren der Veneers ist nicht erforderlich. Das alles macht COMPONEER zu einem Meilenstein der Veneer-Technologie. Ein durchdachtes System an Instrumenten sowie umfassendes Anschauungsmaterial für Zahnarzt und Patient komplettieren das Sortiment. Es versetzt den Anwender rasch in die Lage, schöne, natürliche Restaurationen effektiv und ökonomisch herzustellen.


Oberkiefer

FDI <sub>1</sub>	13	12	11	21	22	23
US <sub>2</sub>	6	7	8	9	10	11



Oberkiefer

FDI <sub>1</sub>	14	24
US <sub>2</sub>	5	12

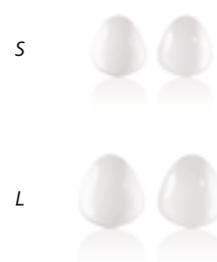

Unterkiefer

FDI <sub>1</sub>	43	42	41	31	32	33
US <sub>2</sub>	27	26	25	24	23	22






#### SYNERGY D6 und SYNERGY D6 Flow

Das Universal Nano Komposit ist farblich perfekt auf COMPONEER abgestimmt. Die einfache Farbwahl, die ausgezeichnete Modellierbarkeit und die hohe Operationslichtbeständigkeit lassen dieses Komposit zum idealen Partner der Veneer-Befestigung werden. Für die Feinkorrektur und den letzten Schliff steht das fließfähige SYNERGY D6 FLOW bereit.




#### One Coat Bond

Dieses Total Etch Bond ist ein lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler. Da COMPONEER primär auf Schmelz gebondet wird, ist es die ideale Adhäsiv-Wahl. Mit der Spritzen-Darreichungsform wird das Bond einfach auf die Brush oder das COMPONEER appliziert. Dank der ausgeprägten Benetzbarkeit ist nur ein einziger Applikationsschritt nötig. Hohe, nachhaltige Haftung ist die Basis für unsichtbare Ränder und eine langlebige perfekte Ästhetik.

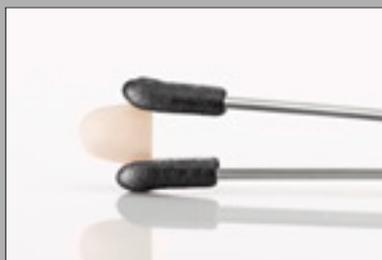


#### COMPONEER Holder

Der Holder ist eine spezielle Haltepinzette, mit der Formkorrekturen am COMPONEER sowie die Applikation von Bond deutlich vereinfacht werden. Die austauschbaren Holder Caps (schwarze Schutzkappen) schützen das COMPONEER.

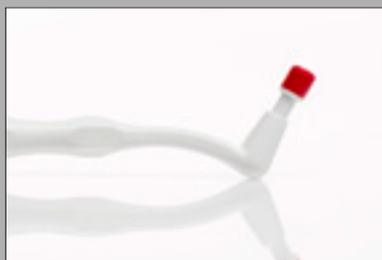

#### COMPONEER Placer

Ein Instrument vom Praktiker für den Praktiker: Mit dem Placer werden die COMPONEER sicher, ohne Abrutschen, ausgerichtet und in Position gebracht.

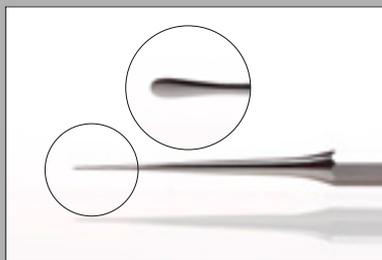

#### COMPONEER Modellierinstrument MB5

Besonders aussergewöhnlich ist das gerade Arbeitsende, welches während der Arbeit eine freie Rotation zulässt. Das Spatelende ist sehr dünn und scharf gestaltet, um Komposit Überschüsse schneidend zu entfernen.



#### COMPONEER Contour Guide


Mit den einzigartigen, bläulich transparenten Contour Guides kann die Konturübereinstimmung und somit die Auswahl der gewünschten Zahnform exakt bestimmt werden. Es stehen insgesamt 36 einzelne Formen zur Verfügung: jeweils 6 pro Grösse.

# Dreimal Grund zum Lächeln. Dreimal zuverlässig.

## SYNERGY D6

### Optimierte Abriebfestigkeit

Die Abrasionsfestigkeit von SYNERGY D6 ist vergleichbar mit der von natürlichem Schmelz und schont die gegenüberliegenden Höcker.

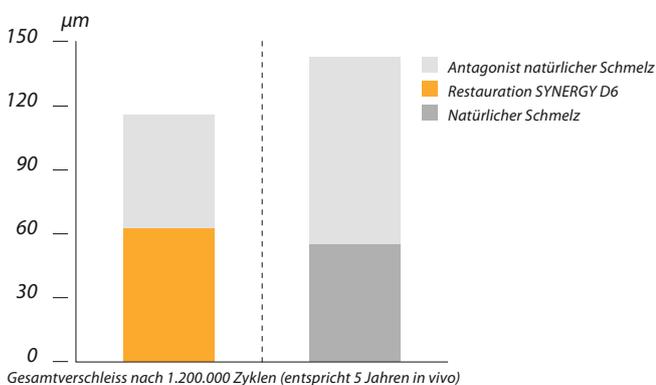


(Quelle: Messungen an den Universitäten Genf/Zürich)

## ONE COAT BOND

### Hohe Haftwerte

One Coat Bond erfordert nur einen Applikationsschritt, der eine perfekte Haftung ermöglicht. COMPONEER in Kombination mit One Coat Bond zeigt eine hervorragende Haftkraft sowohl auf Komposit als auch auf Schmelz und Dentin. Dies gewährleistet zuverlässigen und langen Halt der Restaurationen. Die Haftkraft von COMPONEER ist durch die spezielle mikroretentive Oberfläche deutlich höher als bei Keramikveneers.

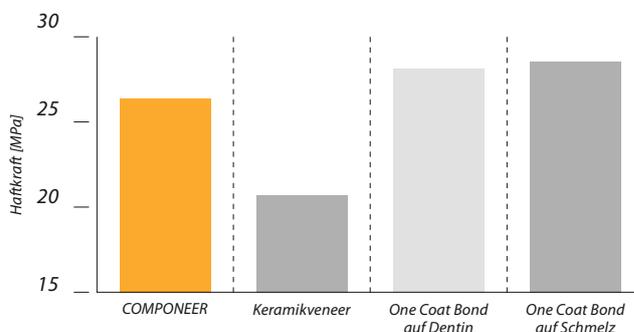


(Quelle: Interne Dokumentation)

## COMPONEER

### Hohe Retention und Raddichtigkeit

Die Raddichtigkeit nach mechanischer und thermischer Wechsellast ist ausserordentlich gut. 92,5% aller Proben zeigen keine Farbstoffpenetration, 7,5% zeigen lediglich minimale Randverfärbungen. Somit haben 100% der Proben keine oder nur minimale Randverfärbungen, was ein überaus positives Ergebnis darstellt. Auch die adhäsive Retention zeigte sich belastungsresistent. Es traten keine Retentionsverluste auf.

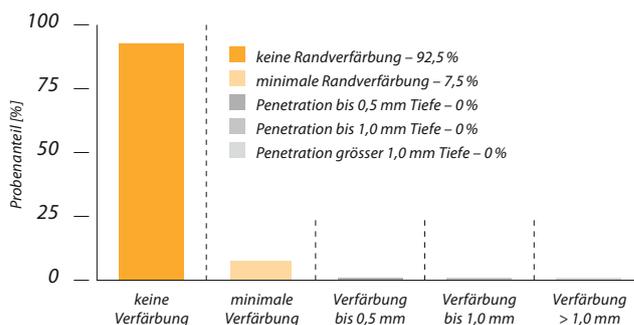

(Quelle: Studie der Universität Genf)

# Das Lächeln für fast alle Fälle.

Ob Schneidekantenverlängerungen, Kaschieren von massiven Zahnverfärbungen oder Schliessen eines Diastemas, mit Hilfe von COMPONEER können ästhetische Korrekturen einfach und schnell realisiert werden. Somit wird die Lücke zwischen der aufwändigen Freihand- und der kostspieligen, indirekten Veneertechnik geschlossen. Natürlich sind Zahnfrakturen, Fehlstellungen oder anatomische Fehlbildungen mit der Direct Composite Veneer-Technik ebenso elegant und dauerhaft restaurierbar. Gerade bei ausgedehnten Sanierungen ist die symmetrische Darstellung von kontralateralen Zähnen auf effiziente Art möglich.

## Klinische Indikationen

### **Kariestherapie**

1. Ausgedehnte zervikale und interdentale Karies, Schmelzverfärbung und leichte Fehlstellung
2. Karies versorgt und mit COMPONEER homogenisierte Frontpartie



### **Optimierung alter Restaurationen**

1. Ausgedehnte alte und insuffiziente Restaurationen
2. Mittels COMPONEER wiederhergestellte Funktion



### **Attrition, Abrasion, Erosion**

1. Im Kopfbiss stehende abradierete und abgebrochene Frontzähne mit alter Restauration
2. Funktionelle und ästhetische Zähne mit normalem Overjet aufgebaut mit COMPONEER



### **Zahnfraktur**

1. Frontzahn mit 1/3 Verlust durch Fraktur
2. Vereinfachte Formgebung und Aufbau mit COMPONEER



## Ästhetische / Kosmetische Indikationen

### **Schneidekantenverlängerung**

1. Leicht verkürzte Schneidekante mit moderater Fehlstellung
2. Die Zahnproportionen mit COMPONEER wieder hergestellt und harmonisiert



### **Zahnfehlstellung**

1. Ausgeprägte Zahnfehlstellung mit Engstand
2. Achsengerechte Korrektur und Neupositionierung mittels COMPONEER



### **Kosmetische Korrektur**

1. Interne, nicht bleichbare Gelbverfärbung und leicht zu kurze Zähne
2. Mit COMPONEER aufgehellte Zähne



### **Zahnverfärbung**

1. Ausgeprägte Schmelz- und Dentinverfärbung, Zahnhalsläsionen
2. Mit COMPONEER wiederhergestellte Funktion und Ästhetik



### **Anatomische Fehlbildung**

1. Ungleiche Zahnformen, Zapfenzahn, Diastema und Fehlstellung
2. Harmonisierung der Zähne untereinander und zur Lippe durch COMPONEER



### **Diastema**

1. Diastema und zu lange Frontzähne
2. Lückenschluss und Neuproportionierung mit COMPONEER



# COMPONEER®

## Zum Lächeln einfach in der Anwendung.

### Nutzenaspekt Patient & Zahnarzt

Ob Einzelzahn oder Gesamtsanierung, COMPONEER ist ein einfaches und sicheres Konzept, welches eine breite Indikationspalette abdeckt. Der Patient profitiert von einer dauerhaften direkten Restaurationstherapie und dem Zahnarzt eröffnen sich neue effiziente Behandlungsmöglichkeiten.

### Klinische Fallstudien

1. Alte Kompositverblendungen mit insuffizienten Rändern



2. Altes Komposit entfernt und Zähne geätzt



1. 11 mit Schmelzfrakturen, Dysmineralisationen und alter Kompositversorgung



2. Minimalinvasive Präparation



3. Mit COMPONEER harmonisierte Zähne zum Ober- und Unterlippenverlauf

4. Trotz kontralateraler Symmetrie der COMPONEER individualisierte Charakteristik

3. Trotz starker Oberflächenstruktur ein optimaler Glanz

4. Optimale marginale Adaptation bei geringster Schichtstärke

## Eigenschaften im klinischen Handling

COMPONEER stellt ein durchdachtes komplettes System dar. Alle Hilfsmittel sind speziell entwickelt und aufeinander abgestimmt worden, um eine einfache und sicherere Anwendung zu gewährleisten.

**1. Ausgangssituation:**  
Verfärbte Zähne, ausgedehnte Karies, Fehlstellung, falsche Achsenneigung.



**2. Vor der Trockenlegung** erfolgt die Schmelz- und Dentinfarbwahl mit den Shade Guides, idealerweise unter Tageslichtlampen.



**3. Mittels der bläulich transparenten Contour Guides** wird die Grösse des COMPONEER exakt ausgewählt.




**4. Die Kofferdamklebetechnik** erleichtert das übersichtliche Arbeiten.



**5. Vor dem Öffnen des verpackten COMPONEER** wird die Form nach der Präparation nochmals verifiziert.



**6. Das COMPONEER wird vorsichtig bis zur Passgenauigkeit beschliffen.**

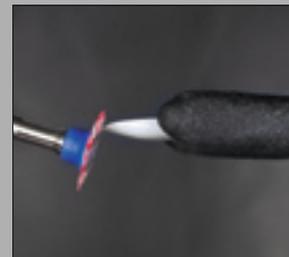

**7. Mit dem Modellierinstrument MB5** wird das Komposit auf dem Zahn verteilt. Mit Hilfe des Placers wird das COMPONEER spannungsfrei in die Endposition gebracht.



**8. Schlusskontrolle bezüglich Randperfektion** vor dem Entfernen des Kofferdams.



**9. Situation nach zwei Wochen.**



SYSTEM KITS	Tips	Spritzen
<p><b>COMPONEER PREMIUM System-Kit</b>  <b>84 COMPONEER:</b>  jedes OK Set: 11, 12, 13, 21, 22, 23  jedes UK Set: 31, 32, 33, 41, 42, 43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 COMPONEER Set OK S - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK M - Enamel Universal</li> <li>2 COMPONEER Set OK L - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK XL - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK S - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set OK M - Enamel White Opalescent</li> <li>2 COMPONEER Set OK L - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set OK XL - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set UK S - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set UK M - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set UK S - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set UK M - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Zubehör Set / Material (siehe 1308 / 1309)</li> <li>1 COMPONEER Zubehör Set / Instrumente (siehe 1310)</li> </ul>	<b>1300</b>	<b>1301</b>
<p><b>COMPONEER BASIC System-Kit</b>  <b>36 COMPONEER:</b>  jedes OK Set: 11, 12, 13, 21, 22, 23  jedes UK Set: 31, 32, 33, 41, 42, 43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 COMPONEER Set OK M - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK L - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK M - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set OK L - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set UK M - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set UK M - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Zubehör Set / Material (siehe 1308 / 1309)</li> <li>1 COMPONEER Zubehör Set / Instruments (siehe 1310)</li> </ul>	<b>1304</b>	<b>1305</b>
<p><b>COMPONEER INTRO System-Kit</b>  <b>24 COMPONEER:</b>  jedes OK Set: 11, 12, 13, 21, 22, 23</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 COMPONEER Set OK M - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK L - Enamel Universal</li> <li>1 COMPONEER Set OK M - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Set OK L - Enamel White Opalescent</li> <li>1 COMPONEER Zubehör Set / Material (siehe 1308 / 1309)</li> <li>1 COMPONEER Zubehör Set / Instruments (siehe 1310)</li> </ul>	<b>6001 4221</b>	<b>6001 4222</b>
<p><b>COMPONEER Zubehör Set / Material</b>  COMPONEER Contour Guide, alle Grössen (OK: S, M, L, XL; UK: S, M)  One Coat Bond (1 × 1,2 ml), Etchant Gel S (1 × 2,5 ml),  SYNERGY D6 Dentin A1/B1, A2/B2;  SYNERGY D6 Enamel White Opalescent, Enamel Universal  (pro Farbe: 10 × 0,25 g Tips; 1 × 4 g Spritze)  1 Shade Guide COMPONEER-SYNERGY D6, SYNERGY D6 Flow Enamel  Universal; 15 Applikationsnadeln für Flow</p>	<b>1308</b>	<b>1309</b>
<p><b>COMPONEER Zubehör Set / Instrumente</b>  1 Modellierinstrument MB5; 1 Holder und 10 Holder Caps; 1 Placer,  2 Placer Adapter, 10 Placer Stamps; Brushholder schwarz und 50 Brushes;  Comprepol Plus Kelch und Spitze, Composhine Plus Kelch und Spitze  (jeweils 1 St.); SwissFlex Trial Kit (1 Mandrell, 11 Scheiben)</p>		<b>1310</b>



1301



1305



6001 4222



1308



1310

COMPONEER SETS UND REFILLS		Enamel White Opalescent	Enamel Universal	Dentin Bleach Opaque
COMPONEER Set <b>OK S</b> , 6 Veneers: 11, 12, 13, 21, 22, 23		1311	1316	
COMPONEER Refill <b>OK S</b> , 2 Veneers	11	1321	1351	
	12	1322	1352	
	13	1323	1353	
	21	1324	1354	
	22	1325	1355	
	23	1326	1356	
COMPONEER Set <b>OK M</b> , 6 Veneers: 11, 12, 13, 21, 22, 23		1312	1317	6001 4500
COMPONEER Refill <b>OK M</b> , 2 Veneers	11	1327	1357	6001 4502
	12	1328	1358	6001 4504
	13	1329	1359	6001 4505
	21	1330	1360	6001 4506
	22	1331	1361	6001 4507
	23	1332	1362	6001 4508
COMPONEER Set <b>OK L</b> , 6 Veneers: 11, 12, 13, 21, 22, 23		1313	1318	6001 4509
COMPONEER Refill <b>OK L</b> , 2 Veneers	11	1333	1363	6001 4510
	12	1334	1364	6001 4511
	13	1335	1365	6001 4512
	21	1336	1366	6001 4513
	22	1337	1367	6001 4514
	23	1338	1368	6001 4515
COMPONEER Set <b>OK XL</b> , 6 Veneers: 11, 12, 13, 21, 22, 23		6001 4010	6001 4012	6001 4516
COMPONEER Refill <b>OK XL</b> , 2 Veneers	11	6001 3998	6001 4004	6001 4517
	12	6001 3999	6001 4005	6001 4518
	13	6001 4000	6001 4006	6001 4519
	21	6001 4001	6001 4007	6001 4520
	22	6001 4002	6001 4008	6001 4521
	23	6001 4003	6001 4009	60014522
COMPONEER Set <b>OK Premolar S</b> , 2 Veneers	14/24	6001 4393	6001 4392	6001 4523
COMPONEER Set <b>OK Premolar L</b> , 2 Veneers	14/24	6001 4396	6001 4394	6001 4524
COMPONEER Set <b>UK S</b> , 6 Veneers: 31, 32, 33, 41, 42, 43		1314	1319	
COMPONEER Refill <b>UK S</b> , 2 Veneers	31	1339	1369	
	32	1340	1370	
	33	1341	1371	
	41	1342	1372	
	42	1343	1373	
	43	1344	1374	
COMPONEER Set <b>UK M</b> , 6 Veneers: 31, 32, 33, 41, 42, 43		1315	1320	
COMPONEER Refill <b>UK M</b> , 2 Veneers	31	1345	1375	
	32	1346	1376	
	33	1347	1377	
	41	1348	1378	
	42	1349	1379	
	43	1350	1380	

<b>KOMPOSIT UND BONDING</b>		
One Coat Bond, 1,2 ml		<b>7879</b>
Etchant Gel S, 2,5 ml		<b>7373</b>
<b>SYNERGY D6 REFILLS</b>	<b>Tips</b> (jedes Tip beinhaltet 0,25 g; 10 Tips/Packung)	<b>Spritzen</b> (jede Spritze beinhaltet 4 g; 1 Spritze/Packung)
Bleach Opaque	<b>6001 3813</b>	<b>6001 3814</b>
Dentin White Bleach	<b>8375</b>	<b>8365</b>
Dentin A1/B1	<b>8376</b>	<b>8366</b>
Dentin A2/B2	<b>8377</b>	<b>8367</b>
Dentin A3/D3	<b>8378</b>	<b>8368</b>
Dentin A3.5/B3	<b>8379</b>	<b>8369</b>
Dentin C2/C3	<b>8380</b>	<b>8370</b>
Dentin A4/C4	<b>8383</b>	<b>8384</b>
Enamel White Opalescent	<b>8382</b>	<b>8372</b>
Enamel Universal	<b>8381</b>	<b>8371</b>
Connect White Opalescent	<b>6001 4029</b>	-
Connect Universal	<b>6001 4030</b>	-
Dispenser für Komposit-Tips, 1 St.		<b>6671</b>
Shade Guide SYNERGY D6, 1 St.		<b>8410</b>
Shade Guide COMPONEER-SYNERGY D6 BL/O, 1 St.		<b>6001 3812</b>
<b>SYNERGY D6 FLOW (1 Spritze à 2,3 g pro Packung)</b>		
A1/B1		<b>7651</b>
A2/B2		<b>7652</b>
A3/D3		<b>7653</b>
A3.5/B3		<b>7654</b>
A4/C4		<b>7655</b>
White Bleach		<b>7656</b>
Enamel Universal		<b>7657</b>
SYNERGY D6 FLOW Applikationsnadeln, 20 St./Packung		<b>8469</b>
<b>INSTRUMENTE/ZUBEHÖR</b>		
Modellierinstrument MB5, 1 St.		<b>6001 1110</b>
Holder, 1 St.		<b>6001 1105</b>
Holder Cap, 40 St.		<b>6001 1106</b>
Placer, 1 St.		<b>6001 1107</b>
Placer Adapter, 5 St.		<b>6001 1108</b>
Placer Stamps, 50 St.		<b>6001 1109</b>
Brushholder schwarz, 1 St.		<b>6001 1111</b>
Brushes, 1 Packung: 500 St.		<b>6001 1112</b>
COMPONEER Contour Guide 7 Grössen, 1 pro Grösse	OK Small	<b>7000</b>
	OK Medium	<b>7001</b>
	OK Large	<b>7002</b>
	OK X-Large	<b>6001 4011</b>
	OK Premolar	<b>6001 4401</b>
	UK Small	<b>7003</b>
	UK Medium	<b>7004</b>
Comprepol Plus, Kelch, 2311RA, 5 St.		<b>230 295AA</b>
Composhine Plus, Kelch, 2411RA, 5 St.		<b>230 303AA</b>
Comprepol Plus, Spitze, 2303RA, 5 St.		<b>230 293AA</b>
Composhine Plus, Spitze, 2403RA, 5 St.		<b>230 301AA</b>
SwissFlex Kit		<b>250 095AA</b>
COMPONEER Rotary Instrument Kit by Dr M. Beseck		<b>6001 3844</b>



6001 1110



6001 1105



6001 1107



6001 3844

# Ausstattung für einen erfolgreichen Start.

## Die COMPONEER-Box Das Lächeln zum gleich Bestellen

Alles, was für die Applikation von COMPONEER gebraucht wird, ist in dem kompakten COMPONEER-System-Kit zusammengestellt.



## COMPONEER- Direct Composite Veneers

Contour Guide  
One Coat Bond  
SYNERGY D6 (Tips oder Spritzen) in den Farben Dentin A1/B1 und Dentin A2/B2 sowie Enamel W/O und Enamel Universal  
SYNERGY D6 FLOW mit Applikationsnadeln  
diverse Polierer  
Zubehör  
COMPONEER Holder  
COMPONEER Placer  
Modellierinstrument MB5

## COMPONEER-Werbemittel

DVD und CD  
Patientenbroschüre  
Poster





**Dr. Mario Besek**

„Das neue COMPONEER Veneer System zur Frontzahnrestauration erweitert die Behandlungsmöglichkeiten, indem es die Vorteile der minimalinvasiven Kompositrestauration und der laborgefertigten Veneertechnik verbindet. Das zukunftsweisende System eröffnet neue wirtschaftliche Perspektiven für Zahnarzt und Patient, die in nur einer Sitzung umgesetzt werden können.“

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
## Bringen Sie Ihre Patienten zum Lächeln.

Mit **COMPONEER** von Coltène/Whaledent.

Wenn Sie eine Beratung zu COMPONEER wünschen oder eine Bestellung aufgeben möchten, steht Ihnen unser Vertrieb jederzeit zur Verfügung.

Besuchen Sie uns einfach unter: [www.componeer.info](http://www.componeer.info)

© 2013 Coltène/Whaledent AG – [www.coltene.com](http://www.coltene.com)



**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstr. 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. + 41 71 757 53 00  
Fax + 41 71 757 53 01  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**Coltène/Whaledent  
GmbH + Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau/Germany  
Tel. + 49 7345 805 0  
Fax + 49 7345 805 201  
[info.de@coltene.com](mailto:info.de@coltene.com)

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
Tel. + 1 330 916 8800  
Fax + 1 330 916 7077  
[info.us@coltene.com](mailto:info.us@coltene.com)

 **COLTENE®**