




NOUVEAU

3M™ Polyether Contact Tray Adhesive (bleu)

VS

3M™ Polyether Adhesive (rouge)

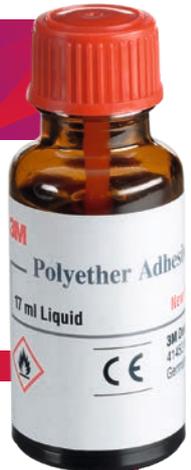

Indications

Convient pour tous les porte-empreintes standard et sur-mesure en vente sur le marché, qu'ils soient en métal, méthacrylate ou polypropylène, en association avec les matériaux pour empreintes à base de polyéther 3M.

Manipulation

Comparable à celle de l'adhésif polyéther 3M™ bleu précédant



Viscosité
fluide

Texture de la surface

non collante



Temps de séchage recommandé

Porte-empreinte en métal 1 min
Porte-empreinte sur-mesure 1 min

Nettoyage

L'adhésif reste sur le matériau pour empreintes.

Il est impératif d'éliminer les résidus avec un solvant (acétone, éthanol).



Réf. article **69408** 1 flacon – 17 ml

Manipulation

Viscosité et manipulation comparables à celles de l'adhésif pour porte-empreinte VPS



Viscosité
épaisse

Texture de la surface

collante



Temps de séchage recommandé

Porte-empreinte en métal 2 min
Porte-empreinte sur-mesure 5 min

Nettoyage

L'adhésif reste sur le porte-empreinte/la base de la prothèse et sur le matériau pour empreintes. La couche adhésive peut être éliminée du porte-empreinte en métal avec le doigt. L'écaillage sous l'eau permet une élimination rapide et facile. Il est également possible d'utiliser des agents de nettoyage pour porte-empreinte en vente sur le marché (p. ex. Pluraclean orange, Pluradent, ou Solitine™, Kerr).



Réf. article **30600** 1 flacon – 17 ml



3M (Suisse) S.a.r.l.
3M Oral Care
Eggstr. 93 · 8803 Rüslikon

Téléphone : (044) 724 93 31
Téléfax : (044) 724 92 38
E-mail : 3mespech@mmm.com
Site web : 3mschweiz.ch/oralcare

3M et 3M Science. Applied to Life. sont des marques déposées de 3M Company. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété d'autres entreprises.
© 3M 2018. Tous droits réservés.