

CENTRIX
Access® Edge

Gingiva- Retraktionspaste auf Tonerde- Basis



Access Edge® retrahiert sanft das Gewebe und kontrolliert gleichzeitig Blutungen und das Aussickern von Flüssigkeiten

Access Edge ist eine auf Tonerde basierende Gingiva-Retraktionspaste, die das Gewebe verdrängt und retrahiert. Sie ist in praktischen Einheitsdosis-Sprzenaufsätzen verpackt und erspart so Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten. Die Paste ist minimal invasiv und gewebeschonend – eine schnelle und einfache Gewebeverdrängung ohne Fadenlegen ist garantiert. Das Material wird subgingival oder um den Zahn herum injiziert und verbleibt dort mindestens 2 Minuten. Während die Paste trocknet, sorgt Access Edge für eine sanfte, aber auch effektive Retraktion zur Öffnung des Sulkus. Die Kombination aus Kaolin-Tonerde und Aluminiumchlorid in Access Edge kontrolliert Blutungen und das Aussickern von Flüssigkeiten, sodass der Sulkus trocken bleibt, während die Abformung erstellt wird.

Zur Verwendung von Access Edge setzen Sie den Einheitsdosis-Aufsatz auf eine Centrix C-R®-Spritze und injizieren das Material langsam in und um den gingivalen Sulkus. Zusätzlich kann GingiCap™ von Centrix verwendet werden, um die Paste in den gingivalen Sulkus zu pressen. Während Access Edge trocknet, retrahiert das Gewebe und gibt die gesamten Ränder des Restaurationsbereichs frei. Nach der Anwendung muss Access Edge gründlich ausgespült werden und der Sulkus an der Luft trocknen, sodass der Präparationsbereich „offen“ und sauber ist.

Eigenschaften von Access Edge:

- Vorgefüllte Spitzen – Automix-Abgabe – kein Anmischen erforderlich
- Abgabe in Einheitsdosen – keine Kartuschen oder Spritzen mit zu großen Mengen
- Einwegartikel – für den Gebrauch bei nur einem Patienten
- Leicht auszuspülen - für einen sauberen, „offenen“ Sulkus
- Einzeln in Folienbeuteln verpackt – hält das Material frisch, ermöglicht eine perfekte Bestandskontrolle und verhindert eine Kreuzkontamination
- Schnelle Retraktion – die Mindestdauer beträgt 2 Minuten



Eine längere, biegsame Nadel erleichtert das Einbringen des Materials in und um den Sulkus.



centrix®
Making Dentistry Easier.™

Gingiva-Retraktion mit Access® Edge in 7 Schritten

- | | |
|------------------|---|
| SCHRITT 1 | Den Zahn für die gewünschte Restauration präparieren. |
| SCHRITT 2 | Den Einheitsdosis-Aufsatz aus der Folienverpackung entnehmen und in eine Centrix C-R®-Spritze einsetzen. Die Kappe entfernen und NeedleTip™ aufsetzen. |
| SCHRITT 3 | Die Paste langsam in und um den Sulkus injizieren. Wenn gewünscht, Kompressionskappen, Watteröllchen oder ein anderes Kompressionsprodukt über der Paste platzieren, um sie im und am Sulkus zu umschließen. Den Patienten zubeißen lassen und warten. |
| SCHRITT 4 | Mindestens 2 Minuten warten, damit die Paste die Nässe absorbieren und das Gewebe retrahieren kann. |
| SCHRITT 5 | Gründlich spülen und trocknen lassen. Es ist wichtig, die Paste vollständig aus dem Sulkus zu entfernen, da Rückstände das Abbinden des Abformmaterials verhindern oder die digitale Bildgebung einschränken können. Wenn nötig wiederholen. |
| SCHRITT 6 | Mithilfe von Abformmaterialien oder digitaler Bildgebung die Abformung erstellen. |
| SCHRITT 7 | Kappe, Aufsatz und Folienbeutel korrekt entsorgen. Spritze für erneute Verwendung desinfizieren. Die Paste enthält neben Kaolin-Tonerde auch etwa 15 % Aluminiumchlorid. Nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Aluminiumchlorid anwenden. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit reichlich Wasser ausspülen. |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Access®Edge

- Gingiva-Retraktionspaste auf Kaolin-Tonerde-Basis
- Enthält 15% Aluminiumchlorid
- Einheitsdosis in Einweg-Folienverpackung

GingiCap™

- Hochdichte, geschlossene Kunststoff-Kompressionskappen
- Die zwei Größen passen bei den meisten Präparationen

ANWEISUNGEN

- Öffnet den gingivalen Sulkus für eine perfekte Abformung.
- Astringierende Wirkung von Aluminiumchlorid mit Kaolin-Tonerde verdrängt das Gewebe und kontrolliert Blutungen und Sekretfluss.

BESTELLINFORMATIONEN

- REF 360113 Access Edge, 15 Spitzen, 10 GingiCaps der Größe Regular (normal) und 10 GingiCaps der Größe Large (groß)
- REF 360114 Access Edge, 60 Spitzen, 30 GingiCaps der Größe Regular (normal) und 30 GingiCaps der Größe Large (groß)

EMPFOHLENE PRODUKTE

Access Edge funktioniert gut mit jeder Centrix C-R-Spritze - jetzt in 6 Ausführungen erhältlich.

CENTRIX C-R SPRITZE

Die C-R Spritzen ermöglichen die schnelle, einfache und präzise Platzierung von Kompositen, Zementen, Glasionomeren, Abformmaterialien und anderen fließfähigen Produkten. Mit leeren Kanülen- und Stopfen-Kartuschen verfügbar - für ein Laden am Behandlungsstuhl. Jedoch auch vorgefüllt mit einer Vielzahl an zahnärztlichen Materialien für den Einmalgebrauch verfügbar.



Die Bestellung ist einfach. Rufen Sie unter unserer kostenfreien Service-Nummer 0800 236 8749 an oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler. Besuchen Sie centrixdental.de für weitere Informationen.

